

5. Alarme und Sicherheitsfunktionen

Bei Auftreten eines Alarms (ausgenommen leerer Akku und technischer Fehler):



Alarm lautlos stellen (falls notwendig)


Ursache beheben und:



Alarm bestätigen




Förderung fortsetzen

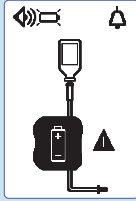


Alarm: Akku leer

Ernährungspumpe über den Pumpenhalter an das Stromnetz anschließen.

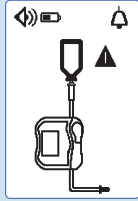


Alarm: Beutel/ Schlauch leer/ Luftalarm

Überleitgerät auf ausreichende Befüllung und sichtbare Luftblasen überprüfen und ggf. Nahrungsbehälter und enterales Überleitgerät austauschen.

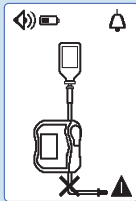


Alarm: Verschluss unterhalb des Fördermechanismus

Überleitgerät unterhalb des Fördermechanismus auf knickfreien Verlauf prüfen. Sonde auf Durchgängigkeit überprüfen.

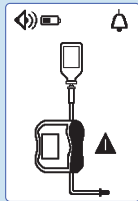


Alarm: Pumpentür offen

Pumpentür schließen.

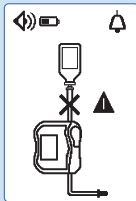


Alarm: Verschluss oberhalb des Fördermechanismus

Überleitgerät oberhalb des Fördermechanismus auf knickfreien Verlauf prüfen. Sonde auf Durchgängigkeit überprüfen.

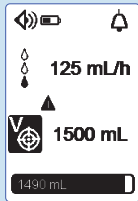


Meldung: Zielvolumen fast erreicht

Förderung fortsetzen oder beenden.

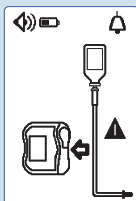


Alarm: Überleitgerät falsch oder nicht eingelegt

Lage des Überleitgeräts oberhalb und unterhalb des Fördermechanismus überprüfen. Ggf. die Lage des Überleitgeräts korrigieren.

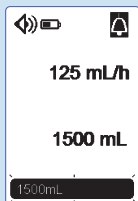


Alarm: Zielvolumen erreicht

Förderung beenden.

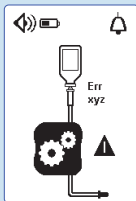

Alarm: Technischer Fehler

Den technischen Fehlercode notieren (Err xyz) und umgehend den zuständigen technischen Service kontaktieren.

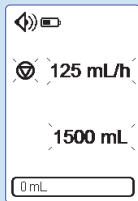

Start-Erinnerung

Ernährungspumpe für den Start der Förderung konfigurieren oder ausschalten.



ZZ10308

Notieren Sie hier Ihre Ansprechpartner:

PI210308-A Amika QRG_DEU
Revisionsdatum: Juli 2021

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig die Gebrauchsanweisung in der jeweils gültigen Version. Amika ist eine eingetragene Handelsmarke von Fresenius Kabi in ausgewählten Ländern. Aufgrund unserer Politik der kontinuierlichen Produktentwicklung sowie Änderungen der Standards können sich die beschriebenen Funktionen ändern oder sie sind in Ihrem Land nicht verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fresenius Kabi Ansprechpartner, um die aktuellsten Informationen zu erhalten. Die Medizinprodukte, darin eingeschlossen auch die Amika Ernährungspumpe, werden von den Gesundheitsbehörden reguliert. Die entsprechende Richtlinie oder Verordnung über Medizinprodukte finden Sie in der entsprechenden CE-Konformitätserklärung. Bitte wenden Sie sich für weitere Details an Ihren Fresenius Kabi Ansprechpartner. Bilder sind nicht Gegenstand einer vertraglichen Vereinbarung.



**FRESENIUS
KABI**
caring for life



Fresenius Kabi AG
Else-Kröner-Str.1
61352 Bad Homburg
GERMANY
Phone: +49 (0) 6172/686-0
www.fresenius-kabi.com



**FRESENIUS
KABI**
caring for life




Amika Enterale Ernährungspumpe

Kurzgebrauchsanweisung




Wichtig: Diese Kurzgebrauchsanweisung ersetzt nicht die umfangreichere und vollständige Gebrauchsanweisung für die Einrichtung und Anwendung der Funktion der Amika Ernährungspumpe.

1. Installation von Ernährungspumpe und Überleitgerät

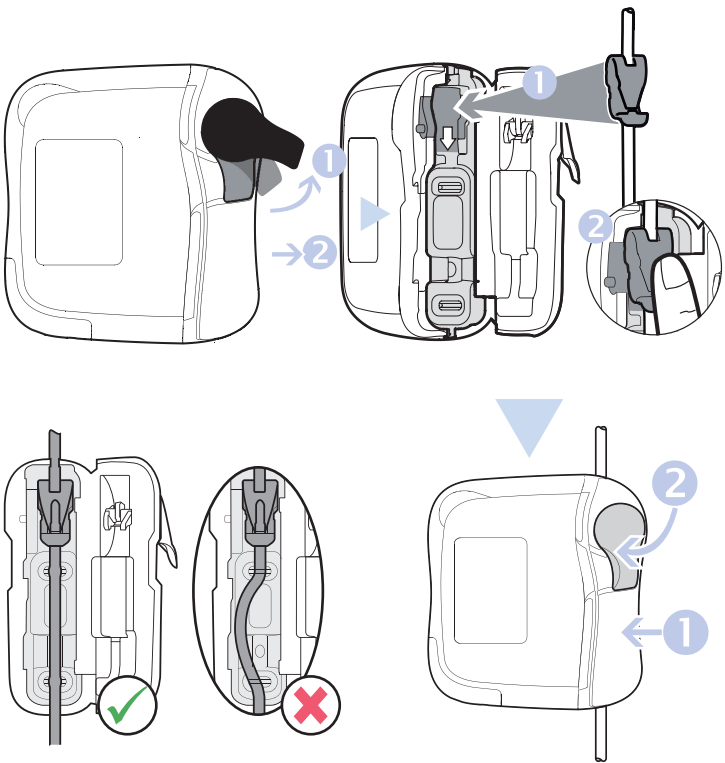

2. Beschreibung der Benutzeroberfläche

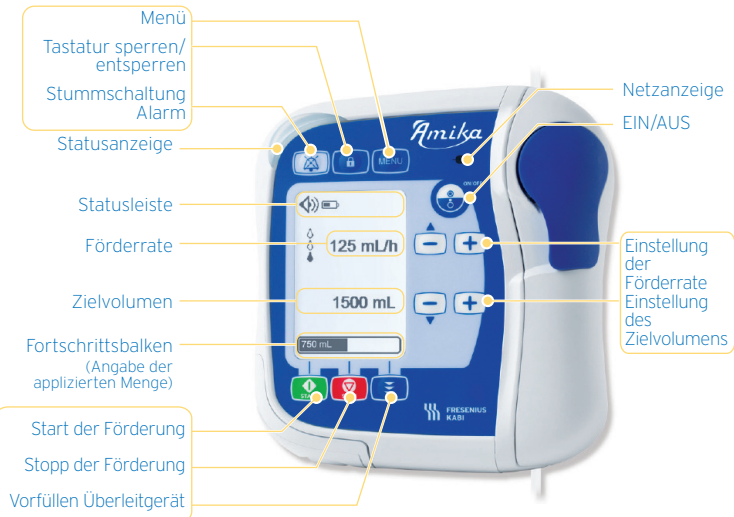


3. Betrieb


3.1 Ernährungspumpe einschalten

3.2 Enterales Überleitgerät vorfüllen

Automatische Vorfüllung (~1 Min. 45 Sek.)

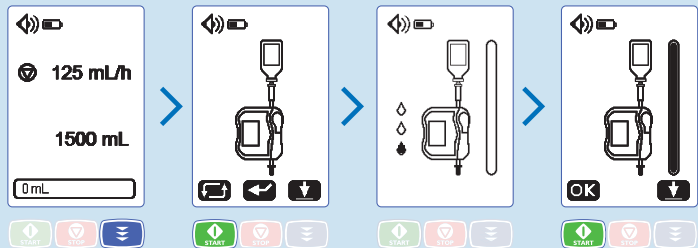

Halbautomatische Vorfüllung

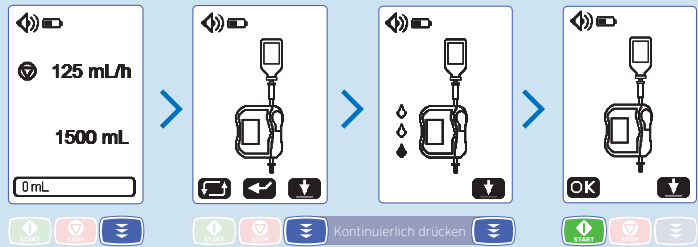

3.3 Förderrate (ml/h) einstellen



3.4 Zielvolumen (ml) einstellen



3.5 Förderung starten (Enterales Überleitgerät zuerst vorfüllen)



3.6 Förderung anhalten



> 2 Sek. : Fortschrittsbalken wird zurückgesetzt

Tastatur sperren/entsperren > 2 Sek. Ernährungspumpe ausschalten > 2 Sek.

4. Menü

Förderung anhalten



und anschließend MENÜ-Taste drücken



Nach oben blättern
Nach unten blättern

Eine Menüfunktion aufrufen oder eine Eingabe bestätigen



Zurück zum vorherigen Bildschirm



Aktivierung/Deaktivierung des Zielvolumens



Aktivierung/Deaktivierung des Nachtmodus



Alarmlautstärke/Tastentöne



Aktivierung/Deaktivierung der Einstellsperre*



Zähler des „kumulierten Fördervolumens“



Alarmhistorie



Ernährungsverlauf



Kontrast/Helligkeit



Zeitintervall zwischen 2 Alarmtönen*



Zeitintervall für Auslösung des „Zielvolumen-Voralarms“**



Technische Daten

*Zugriffscod erforderlich