

NUTRICIA

flocare[®] Infinity[™] III

KURZBEDIENUNGS- ANLEITUNG

Hinweise zu Tasten

- i** > Über die **INFO**-Taste erhalten Sie jederzeit Hilfe und Informationen zum aktuellen Pumpenstatus.



Die Tasten rechts neben dem Bildschirm dienen der Navigation und werden im Folgenden als **Zusatz-Tasten** bezeichnet.



Einrichten der Pumpe:

Verbinden Sie das Überleitgerät mit dem Nahrungs- oder Flüssigkeitsbehältnis wie auf der Verpackung des Flocare[®] Infinity[™] Überleitgeräts beschrieben.

- 1** > Öffnen Sie die Pumpentür.
- 2** > Legen Sie die Silikonschlaufe des Pumpsegments um den Pumpenrotor.
- 3** > Legen Sie die Kassette durch leichtes seitliches Ziehen in die Pumpe ein. Die Kassette ist so ausgelegt, dass sie nur in eine Richtung in die Pumpe eingelegt werden kann.
- 4** > Schließen Sie die Pumpentür.
- 5** > Die Pumpe kann nun programmiert werden.

Kurzbedienungsanleitung:

- AN/AUS**  > Schalten Sie die Pumpe ein, indem Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt halten.
- BEFÜLLEN**  > Halten Sie die **BEFÜLLEN**-Taste für 2 Sekunden gedrückt, um die automatische Befüllung des Überleitgeräts zu aktivieren.
- > **Verbinden Sie das Überleitgerät mit der Ernährungssonde**
- THERAPIE**  > Das Programmieren der Therapien erfolgt über die **THERAPIE**-Taste.
Folgende Therapie-Arten können eingestellt werden:

- 1. Menge-Laufrate:** Wählen Sie die **MENGE-LAUFRATE**-Taste, drücken Sie die Zusatz-Taste bei **MENGE**, ändern Sie die zu verabreichende Menge durch Drücken der Tasten „+“ und „-“ und bestätigen Sie den Wert mit „>“. Drücken Sie die Zusatz-Taste bei **LAUFRATE**, ändern Sie diese durch Drücken der Tasten „+“ und „-“ und bestätigen Sie den Wert mit „>“.
- 2. Laufrate:** Wählen Sie die **LAUFRATE**-Taste, drücken Sie die Zusatz-Taste bei **LAUFRATE** und ändern Sie diese durch Drücken der Tasten „+“ und „-“ und bestätigen Sie den Wert mit „>“.
- 3. Intermittierend:** Wählen Sie die **INTERMITTIEREND**-Taste, drücken Sie die Zusatz-Taste bei **GESAMTMENGE**, ändern Sie die zu verabreichende Gesamtmenge durch Drücken der Tasten „+“ und „-“ und bestätigen Sie den Wert mit „>“. Drücken Sie die Zusatz-Taste bei **PORTIONEN**, ändern Sie die erforderlichen Portionen durch Drücken der Tasten „+“ und „-“ und bestätigen Sie den Wert mit „>“, drücken Sie die Zusatz-Taste bei **LAUFRATE**, ändern Sie diese durch Drücken der Tasten „+“ und „-“ und bestätigen Sie den Wert mit „>“. Drücken Sie die Zusatz-Taste bei **PAUSE**, ändern Sie die erforderlichen Pausenzeiten durch Drücken der Tasten „+“ und „-“ und bestätigen Sie den Wert mit „>“, validieren Sie die Eingabe durch die rechte Taste neben **BESTÄTIGEN**.

- THERAPIE**  > Drücken Sie die **START/PAUSE**-Taste, um die Ernährungstherapie zu starten.

NUTRICIA

flocare® Infinity™ III

KURZBEDIENUNGS- ANLEITUNG

Alarmer und Fehlermeldungen

Auszug (Eine vollständige Übersicht finden Sie in der Bedienungsanleitung)



Alarm/Fehlermeldung	Alarmbeschreibung und -behebung
SET ERNEUT EINLEGEN	> Das Überleitgerät ist nicht oder nicht korrekt eingelegt. > Legen Sie das Überleitgerät korrekt ein.
SET WECHSELN SET > 24 STD.	> Das Überleitgerät wurde länger als 24 Stunden verwendet. > Tauschen Sie das Überleitgerät aus.
BEDIENUNG ERFORDERLICH	> Die Tasten der Pumpe wurden für mindestens 3 Minuten nicht betätigt. > Drücken Sie eine beliebige Taste.
MENGE VERABREICHT	> Programmierte Menge wurde vollständig verabreicht. > HOME -Taste drücken, um die Warnmeldung zu quittieren. > Pumpe ausschalten, wenn die Ernährungstherapie beendet ist.
LUFT IM SET	> Überprüfen Sie, ob das Flüssigkeits- oder Nahrungsbehältnis leer ist > Wenn die programmierte Menge verabreicht ist, entfernen Sie das Behältnis und das Überleitgerät und entsorgen Sie diese. > Wenn die benötigte Menge noch nicht verabreicht wurde, entfernen Sie das Überleitgerät von der Sonde und betätigen Sie die Taste BEFÜLLEN , um die Luft aus dem Überleitgerät zu entfernen. > Stellen Sie sicher, dass der Luftsensord sauber ist. > Verbinden Sie die Ernährungssonde mit dem Überleitgerät und setzen Sie die Ernährung fort. > Stellen Sie sicher, dass im Nahrungsbehältnis keine übermäßige Schaumbildung vorliegt.
OKKLUSION EINGANG	> Überleitgerät zwischen der Pumpe und dem Flüssigkeits-/Nahrungsbehältnis auf Knick- und Blockaden überprüfen. > Sensoren reinigen. > Bei anhaltendem Fehler Überleitgerät tauschen.
OKKLUSION AUSGANG	> Überleitgerät zwischen der Pumpe und der Ernährungssonde auf Knick- und Blockaden überprüfen. > Sensoren reinigen. > Bei anhaltendem Fehler Überleitgerät tauschen.
KEIN STECKERSYMBOL	> Die Steckdose funktioniert nicht. > Das Netzteil ist defekt. > Verwenden Sie eine andere Steckdose. > Kontaktieren Sie Nutricia für ein neues Netzteil.
AKKU SCHWACH	> Der Akkustand ist niedrig. > Schließen Sie die Pumpe über das Netzteil an die Stromversorgung an. > Die Pumpe kann während des Ladens verwendet werden. > Die Pumpe lädt innerhalb von 6 Stunden vollständig auf.
PUMPENTÜR GEÖFFNET	> Die Pumpentür ist nicht richtig geschlossen. > Schließen Sie die Tür vollständig.
LAUFRATE FEHLT	> Laufrate nicht programmiert. > Laufrate (ml/h) muss programmiert werden.
MENGE FEHLT	> Menge nicht programmiert. > Zu verabreichende Menge (ml) muss programmiert werden.
SYSTEMFEHLER	> Ein Systemfehler ist aufgetreten. > Pumpe ausschalten, sicherstellen, dass die Pumpentür geschlossen ist. > Pumpe anschalten. > Bei anhaltendem Fehler Nutricia kontaktieren.

Nutzen Sie unsere individuelle **Produkt- und Ernährungsberatung**: Telefon: **00800 700 500 00** (gebührenfrei)

NUTRICIA

Hersteller **Flocare® Infinity™**:
Nutricia Medical Devices bv.
The Netherlands
www.nutriciaflocare.com

Vertrieb Deutschland:
Danone Deutschland GmbH
Am Hauptbahnhof 18
D-60329 Frankfurt am Main
Tel. 069 719 135 0
Fax 069 719 135 45 22
www.nutricia.de

Vertrieb Österreich:
Danone Österreich GmbH
Halleiner Landesstraße 58
A-5412 Puch/Hallein
Tel. 06245 794 0Fax
06245 794 256
www.nutricia.at

Nutricia Schweiz:
Danone Schweiz AG
Hardturmstrasse 135
CH-8005 Zürich
Tel. 044 306 90 00
Fax 044 306 89 89
www.nutricia.ch