

NUTRICIA

flocare[®] Infinity[™]

KURZBEDIENUNGS-ANLEITUNG

Vorbereitung der Pumpe:

Verbinden Sie das Flocare[®] Infinity Überleitgerät wie auf der Verpackung angegeben mit dem Nahrungsbehälter.



- 1 > Öffnen Sie die Pumpentür, indem Sie auf den Clip (Verschlussklemme) (A) der Pumpentür drücken und gleichzeitig die Pumpentür (B) nach oben zurückklappen.
- 2 > Positionieren Sie die Schlaufe des Pumpsegments des Überleitgeräts leicht gedehnt um den Rotor.
- 3 > Legen Sie die Schlauchkassette in die Vorrichtung.
- 4 > Schließen Sie die Pumpentür.
- 5 > **Jetzt können Sie die Pumpe einschalten.**

Kurzbedienungsanleitung:

Volumen löschen und Überleitgerät befüllen

- ON/OFF** > beim Ein- und Ausschalten 2 Sekunden lang gedrückt halten
 - CLR** > verabreichtes Volumen wird auf „0“ gesetzt
 - FILL SET** > durch das Drücken dieser Taste für 2 Sekunden wird das Überleitgerät automatisch befüllt*
- > Überleitgerät mit der Sonde verbinden. Einstellung **1** oder **2** wählen

- 1 Dauertropfapplikation
Display: ml/h > **+** 400 ml/h > **START/STOP**
- 1 ml/h
- 2 Dauertropfapplikation mit Gesamtvolumenprogrammierung
Display: ml/h > **+** 400 ml/h > **DOSE = VOL** > **+** 4.000 ml > **START/STOP**
- 1 ml/h

* Die „FILL SET“-Funktion sollte nur genutzt werden, um ein leeres (luftbefülltes) Überleitgerät zu befüllen. Die Nutzung der „FILL SET“-Funktion zu einem anderen Zweck kann dazu führen, dass sich die Pumpe falsch kalibriert. Sobald die „FILL SET“-Funktion gestartet wurde, kalibriert sich die Pumpe auf das jeweils eingelegte Überleitgerät.

KURZBEDIENUNGS- ANLEITUNG

Auszug aus den Fehlermeldungen:

(bitte beachten Sie die
ausführliche Bedienungsanleitung)



Fehler	Korrektur
NO SET	> [ON/OFF] für 2 Sekunden drücken, um die Pumpe auszuschalten > Flocare Überleitgerät für Infinity (nochmal korrekt) nach Gebrauchsanleitung einlegen > Pumpe mit [ON/OFF] wieder einschalten > mit Drücken von [START/STOP] wieder starten
PUSH STRT	> die Pumpe ist in Halteposition: 1x [START/STOP] drücken, um Halteposition um 3 Minuten zu verlängern > zum Start der Pumpe [START/STOP] erneut drücken
END OF DOSE	> das Gesamtvolumen ist verabreicht > [START/STOP] drücken > [INFO] drücken und mit [CLR] Daten löschen > [START/STOP] drücken, um Pumpe ggf. wieder zu starten
AIR	> überprüfen Sie, ob das Überleitgerät korrekt eingelegt wurde und der Luftsensord sauber ist > die Luft im Überleitgerät mit [FILL SET] beseitigen
OCC IN	> [START/STOP] drücken > bei [OCC IN] Überleitgerät auf Durchlässigkeit und Kassette auf Sauberkeit überprüfen und ggf. reinigen. Bei [OCC OUT] Sonde auf Durchlässigkeit prüfen > Überleitgerät ggf. wieder einlegen und durch Drücken von [START/STOP] wieder starten
OCC OUT	> Pumpe mit [START/STOP] anhalten, erneut kurz (1 Sekunde) laufen lassen > Pumpe erneut mit [START/STOP] anhalten, bevor die Pumpe in OCC/Air Alarm geht > Überleitgerät entfernen und wieder einlegen
AIR (wiederholt)	> Pumpe wieder starten mit [START/STOP]
ER01 – ER99	> elektronischer Fehler > Pumpe mit [ON/OFF] aus- und wieder einschalten
ERRA – ERRZ	> falls sich diese Fehlermeldung wiederholt > Pumpe in den Service
KEIN Q:SYMBOL	> das Ladegerät oder die Steckdose funktioniert nicht
BATT	> Akku schwach > Pumpe über das Netz-/Ladegerät ca. 6 Std. aufladen > die Pumpe kann währenddessen weiterbenutzt werden
DOOR*	> Pumpentür nicht richtig geschlossen > Pumpentür schließen
PROG*	> Dauertropftrate wurde nicht eingestellt > Dauertropftrate einstellen

* nicht für Seriennummern 76500000–76649999

Nutzen Sie unsere individuelle **Produkt- und Ernährungsberatung**:
 Telefon: **00800 700 500 00** (gebührenfrei)



Hersteller Infinity:
 Nutricia Medical Devices bv.
 The Netherlands
 www.nutriciaflocare.com

Vertrieb Deutschland:
 Danone Deutschland GmbH
 Am Hauptbahnhof 18
 D-60329 Frankfurt am Main
 Tel. 069 719 135 0
 Fax 069 719 135 45 22
 www.nutricia-med.de

Vertrieb Österreich:
 Danone Österreich GmbH
 Halleiner Landesstraße 58
 A-5412 Puch/Hallein
 Tel. 06245 794 0
 Fax 06245 794 256
 www.nutricia-med.at

Nutricia Schweiz:
 Danone Schweiz AG
 Hardturmstrasse 135
 CH-8005 Zürich
 Tel. 044 306 90 00
 Fax 044 306 89 89
 www.nutricia-med.ch